

# PROLANCE®

Lancetas de seguridad para la extracción de muestras de sangre capilar



## Prolance®

- La aguja se retrae automáticamente y se bloquea para mayor seguridad, lo que protege a los pacientes y a los profesionales de la salud de las lesiones causadas por pinchazos de aguja.
- Hay seis tamaños diferentes disponibles que permiten a los profesionales elegir la cantidad de sangre adecuada para cada prueba capilar.
- El dispositivo Prolance® es rápido y fácil de usar, ya que requiere pocas instrucciones.
- El dispositivo Prolance® no puede recargarse ni reutilizarse, lo que protege tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud.
- Acción de doble resorte para mayor comodidad del paciente.
- Diseñado para permitir el control de la profundidad de la aguja para mayor comodidad del paciente.
- Esterilización por rayos gamma, lo que le asegura al paciente la esterilidad del dispositivo.
- Estructuras laterales ergonómicas y de fácil agarre que no permiten que se deslice.





## Cómo usar PROLANCE®?

- 1** Desenrosque el tapón protector y tire de él para quitarlo.
- 2** Coloque el dispositivo Prolance® en el lugar de punción deseado y presione el botón para activar el dispositivo.
- 3** Con suavidad, aplique presión intermitente cerca del lugar de punción para obtener el volumen de sangre deseado.

Nombre	Tamaño de aguja	Profundidad de penetración	N.º de producto	Unidades/caja	Transporte y empaque del pedido
--------	-----------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------------------------------



Prolance®	Micro Flow	28G	1.6 mm	7604	200 ud	18 cajas
-----------	------------	-----	--------	------	--------	----------



Prolance®	Low Flow	≈25G	1.4 mm	7599	200 ud	18 cajas
-----------	----------	------	--------	------	--------	----------



Prolance®	Normal Flow	≈21G	1.8 mm	7594	200 ud	18 cajas
-----------	-------------	------	--------	------	--------	----------



Prolance®	High Flow	≈18G	1.8 mm	7601	200 ud	18 cajas
-----------	-----------	------	--------	------	--------	----------



Prolance®	Max Flow	Blade	1.6 mm	7620	200 ud	18 cajas
-----------	----------	-------	--------	------	--------	----------



Prolance®	Pediatric	Blade	1.2 mm	7609	200 ud	18 cajas
-----------	-----------	-------	--------	------	--------	----------

